


Agrafador Linear TA

Instruções de utilização

O nosso agrafador cirúrgico linear coloca automaticamente duas fileiras de agrafos para suturar o tecido. É utilizado para substituir e simplificar a sutura manual e amplamente aplicado pela eficiência e comodidade, encurtando o tempo da cirurgia.

Esquema do agrafador

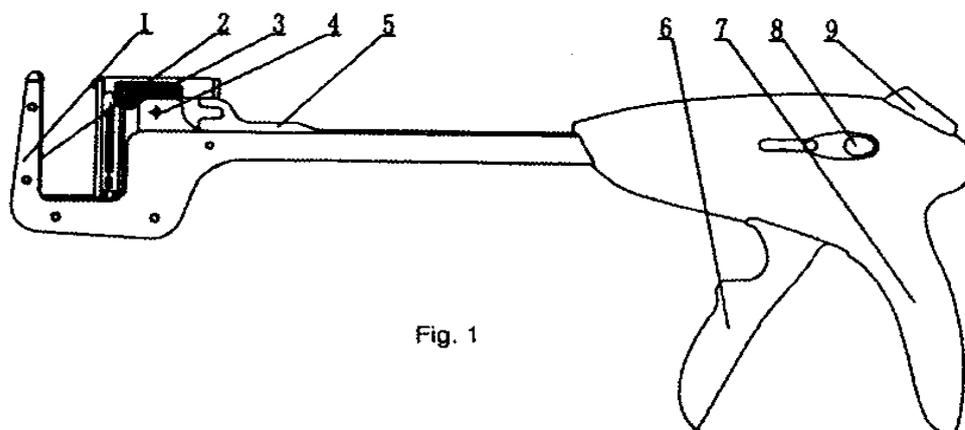


1. Mandíbulas; 2. Bigorna; 3. Cartucho; 4. Local do cartucho; 5. Pino de retenção; 6. Pega móvel; 7. Pega fixa; 8. Botão de polegar do pino de retenção; 9. Botão de liberação

Especificações do produto

Referência do agrafador	Referência da recarga	Espessura do tecido	Altura do agrafado
CKH303	CH303	1.5mm	3.8mm
CKH453	CH453	1.5mm	3.8mm

Instruções de utilização


1. Retire o agrafador esterilizado da embalagem. Coloque o tecido pretendido entre o cartucho e a bigorna (Fig. 2).

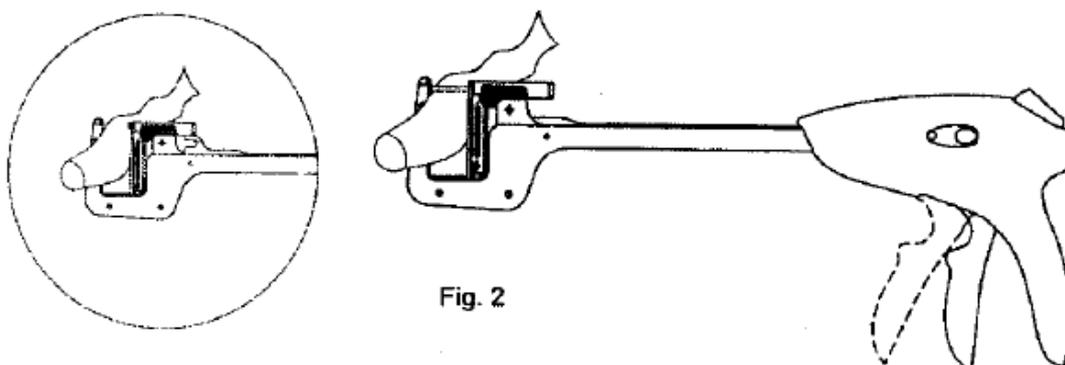


2. Segure as pegas (Fig. 3) para mover a pega móvel para trás até cerca da metade da faixa móvel, solte a pega móvel e segure-a.

Ajuste o tecido entre o cartucho e a bigorna se forma adequada e sem sobreposição. Depois pressione a pega móvel até ao fim (Fig. 4) e até que o som de clique possa ser ouvido. O tecido pretendido deve ficar preso entre o cartucho e a bigorna.

Solte a pega móvel para retornar automaticamente ao local original e prender o tecido entre a bigorna e o cartucho.

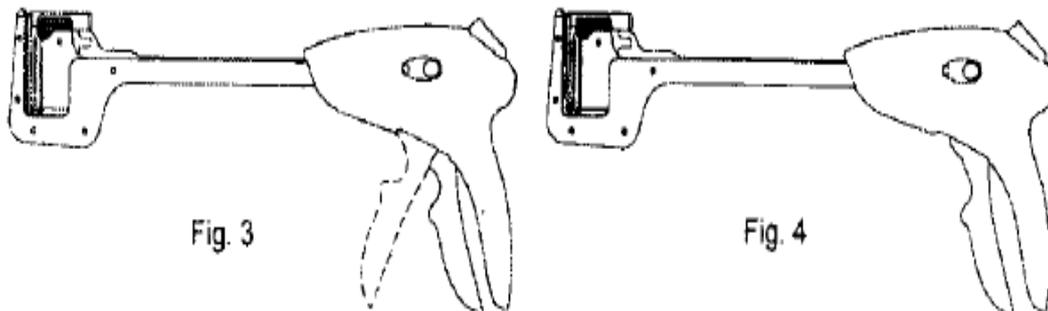

3. Segure as pegas novamente e pressione a pega móvel até o final (Fig. 5), para agrafar e suturar o tecido. A pega móvel é travada para completar a sutura.

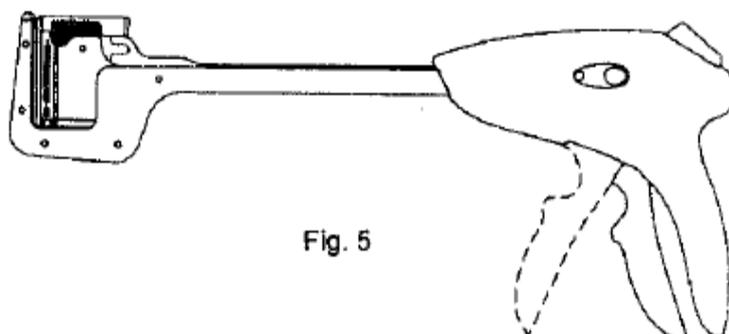

4. Corte o excesso de tecido com um bisturi e pressione o botão de liberação (Fig. 6) para abrir automaticamente a pega móvel. Retire o botão do polegar do pino de retenção e remova o agrafador.


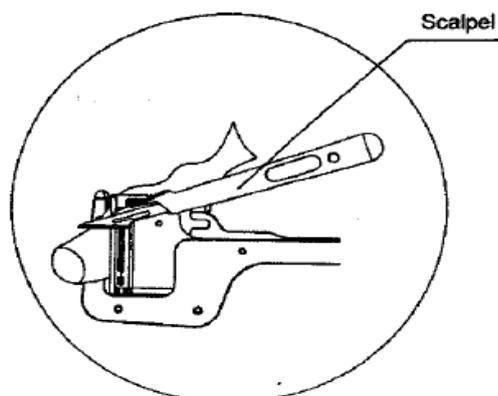


Fig. 6

Recarga

Se for necessário suturar mais do que uma vez no mesmo procedimento cirúrgico, mova o botão polegar do pino de retenção para trás até o final para retirar o cartucho usado e substituí-lo por um novo (Fig. 7). Repita os passos 1 - 4 para suturar novamente.

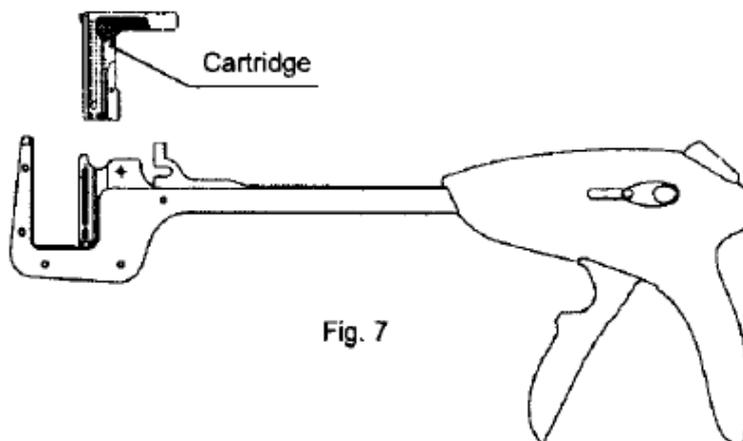

Avisos e cuidados

1. Ao fechar o agrafador linear a espessura do tecido a ser suturado deve estar de acordo com as especificações do produto.
2. Depois de remover o agrafador, examine cuidadosamente a linha dos agrafos por hemostasia e verifique se se encontram bem fechados. Se a hemostasia não se verificar, técnicas apropriadas devem ser usadas para atingir a hemostasia.
3. Este é um instrumento de uso único e só pode ser usado para um procedimento cirúrgico.