

## Instruções do Motor Cirúrgico

### Instruções do Motor Cirúrgico

Todo o material é autoclavável em **ciclo termossensível, 121º, 1 BAR**, exceto as baterias, que devem ser previamente removidas.

O motor cirúrgico não deve ser submerso em água e deve ser totalmente seco após a sua limpeza e/ ou esterilização. Não se recomenda a utilização de calor seco (estufa) no processo de esterilização.

Seguindo as instruções pode-se realizar aproximadamente 1000 ciclos de esterilização.

### Limpeza e lubrificação

O motor deve ser primeiramente lavado com um pano húmido ou com cuidado sob água corrente (após remoção da bateria), não devendo sob nenhuma circunstância ser submerso em água. De seguida deverá ser realizada a sua secagem na totalidade para evitar a humidade no interior do motor e que poderá comprometer o seu bom funcionamento.

Antes e após cada esterilização o motor e o acessório utilizados devem ser bem lubrificados, utilizando um lubrificante apropriado.

O lubrificante, de preferência em spray/ aerossol para facilitar a aplicação nas zonas menos acessíveis, deverá ser aplicado na zona de conexão entre o motor e o acessório, em ambas as peças.

Após lubrificação, o acessório deverá ser conectado ao motor, fazendo-o trabalhar cerca de 10 segundos em cada sentido de rotação para promover a penetração do lubrificante e a remoção dos resíduos acumulados no interior das peças.

O lubrificante deverá ser aplicado tantas vezes quantas as necessárias para remover todos os resíduos e sujidade depositados no interior do motor e/ ou acessório.

A não realização da limpeza e lubrificação de acordo com o procedimento mencionado pode comprometer o bom funcionamento do motor e acessórios, sendo considerado mau uso, pelo que avarias associadas não estão abrangidas pela garantia do produto.

## **Aviso Baterias**

As baterias e o carregador **não são autoclaváveis** e devem ser previamente removidas. Confirme sempre se removeu as baterias antes de colocar o motor no autoclave.

Se a bateria não for utilizada durante períodos prolongados, deverá ser carregada a cada 15 dias para se manter activa. Seguindo as instruções pode-se realizar aproximadamente 150 ciclos de carga/descarga.

## **Aviso Serra TPLO**

Recomendamos que, ao usar a serra TPLO, apenas inicie o motor com a lâmina da serra TPLO já colocada e com o parafuso bem ajustado. Ao iniciar a serra TPLO sem a lâmina de serra TPLO fixada, poderá perder o parafuso.