

Serra Vertical TPLO

Descrição	Especificações	Peso
Serra Vertical TPLO	Output: 9,6 V	0,90 kg (sem bateria) 33,5cm x 5cm (comp x diam)
Caixa	360x245x65 mm	
Lâminas circulares TPLO	8, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 mm	
Bateria	Output: 9,6 V	0,30 kg
Carregador		
Passador de bateria		

Instruções do Motor Cirúrgico

Todo o material é autoclavável em **ciclo termossensível, 121º, 1 BAR**, exceto as baterias, que devem ser previamente removidas.

O motor cirúrgico não deve ser submerso em água e deve ser totalmente seco após a sua limpeza e/ ou esterilização. Não se recomenda a utilização de calor seco (estufa) no processo de esterilização.

Seguindo as instruções pode-se realizar aproximadamente 1000 ciclos de esterilização.

Aviso Baterias

As baterias e o carregador **não são autoclaváveis** e devem ser previamente removidas. Confirme sempre se removeu as baterias antes de colocar o motor no autoclave.

Se a bateria não for utilizada durante períodos prolongados, deverá ser carregada a cada 15 dias para se manter activa. Seguindo as instruções pode-se realizar aproximadamente 150 ciclos de carga/descarga.

Aviso Serra TPLO

Recomendamos que, ao usar a serra TPLO, apenas inicie o motor com a lâmina da serra TPLO já colocada e com o parafuso bem ajustado. Ao iniciar a serra TPLO sem a lâmina de serra TPLO fixada, poderá perder o parafuso.